


Dräger DrugCheck® 3000 Produkty do badań na obecność narkotyków

Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku minut, czy dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu. Kompaktowy i bazujący na ślinie test narkotykowy zapewnia niezawodne wyniki w prosty i higieniczny sposób. Urządzenie nie wymaga energii elektrycznej i może być używane w dowolnym miejscu.

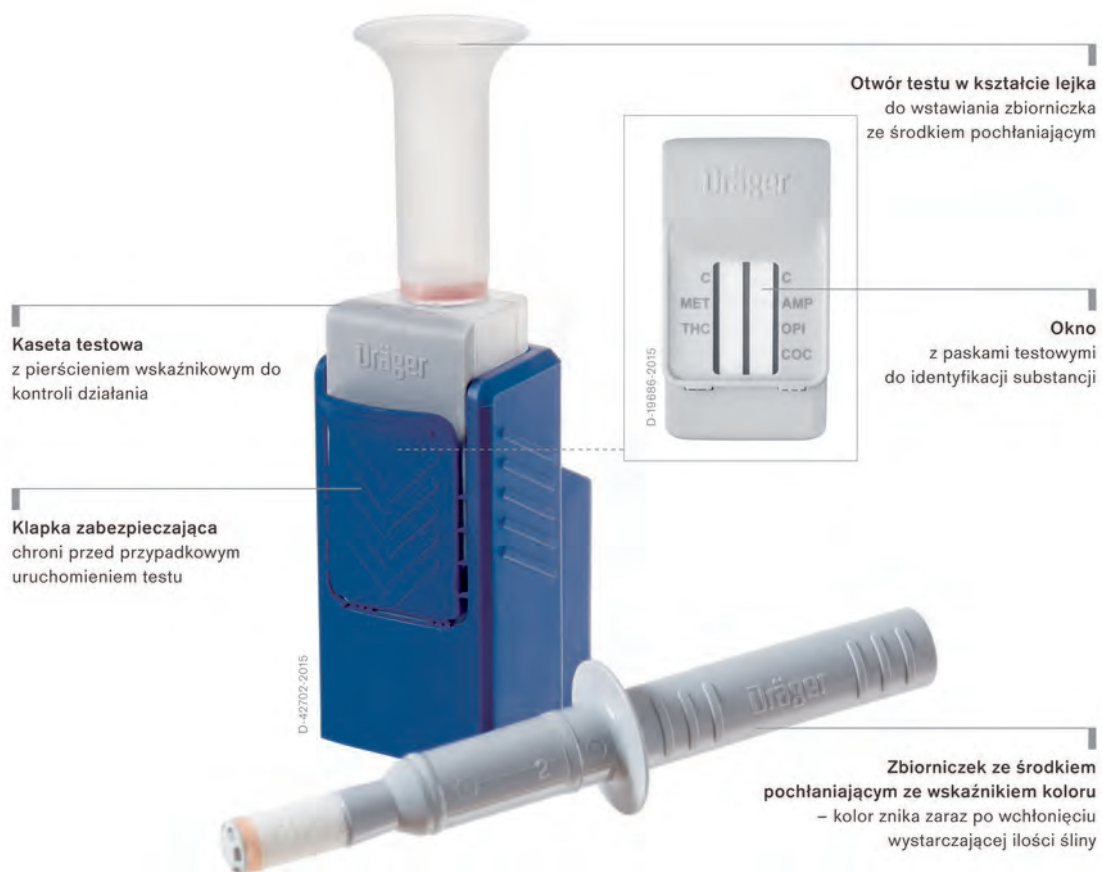

Zalety

Proste i bezpieczne pozyskiwanie próbek

Test Dräger DrugCheck 3000 obejmuje dwa elementy: zbiorniczek ze środkiem pochłaniającym do pobierania próbki śliny oraz kasetę testową do analizy. Kasetę testową zawiera ciecz buforową i okienko z dwoma paskami, które wyświetla linie kontrolne i testowe. Sam test jest przeprowadzany w trzech prostych etapach: pobranie wacikiem próbki śliny, wstrząśnięcie zestawem testowym, odczekanie na krótki okres inkubacji i rozpoczęcie testu. Wskaźnik koloru na waciku znika zaraz po wchłonięciu wystarczającej ilości śliny do przeprowadzenia testu.

Wyniki można odczytać od razu po pojawieniu się linii kontrolnych w okienku. Jeśli wynik badania jest negatywny, obok odpowiedniej klasy substancji (narkotyku) pojawi się linia. Oznacza to, że żadna z substancji docelowych nie została wykryta w próbce. Jeśli linia nie pojawi się obok jednej z klas substancji, oznacza to, że wynik dla tej substancji jest pozytywny.

Szybka i czuła analiza

Możliwość sprawdzania pięciu klas substancji jednocześnie za pomocą testu Dräger DrugCheck 3000: kokaina, opiaty, amfetamina, metaamfetamina / narkotyki syntetyczne (np. Ecstasy) i konopie indyjskie (THC). Spośród wszystkich wymienionych klas substancji konopie indyjskie należą do najczęściej używanych narkotyków i są również najtrudniejsze do zidentyfikowania (THC). Dlatego właśnie test Dräger DrugCheck 3000 zoptymalizowano pod kątem wykrywania THC, tak więc teraz oferuje on dwie opcje pomiaru: w zależności od wybranego czasu oczekiwania (inkubacja wstępna) dla testu dostępna jest opcja szybka z wyższą wartością graniczną stężenia THC i opcja czuła z niższą wartością graniczną stężenia tej substancji. Całe badanie trwa tylko od 5 do 7 minut.

Jednoznaczne wykrywanie narkotyków na miejscu

Niewielkie, kieszonkowe rozmiary sprawiają, że test DrugCheck 3000 można z łatwością przenosić. Można go szybko i łatwo przygotować do użycia, a ponadto nadaje się on do zastosowań wymagających elastyczności użytkownika, takich jak kontrole drogowe i testy w miejscach pracy, w których wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa*. Zestaw testowy nie ma części elektrycznych, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w obszarach niebezpiecznych.

Dodatkowe zalety

Dräger ma wieloletnie doświadczenie w obszarze urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu we krwi i metod wykrywania narkotyków. W przypadku testu DrugCheck 3000 firma Dräger zastosowała zasadę testowania opartą na sprawdzonym systemie Dräger DrugTest® 5000, który niezawodnie wykrywa nawet najdrobniejsze ślady THC. Jednorazowy zestaw testowy DrugCheck 3000 jest odporny na manipulacje i jest higieniczny.

*DrugCheck® 3000 w Stanach Zjednoczonych jest sprzedawany tylko organom egzekwowania prawa.

Powiązane produkty



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych wyników.



D-6296-2009

Zestaw do poboru próbki Dräger SSK 5000

Dräger SSK 5000 służy do potwierdzenia możliwej obecności narkotyku na danej powierzchni. Jest on szybki i łatwy w użyciu. W przypadku użycia w połączeniu z Dräger DrugTest® 5000 próbkę można przenieść do kasy testowej i sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia narkotykami. Próbkę można także zachować przetransportować na potrzeby dalszego testowania.



ST-13226-2007

Zestaw do poboru i przechowywania śliny Dräger DCD 5000

Proste, szybkie i bezpieczne wykrywanie środków odurzających i narkotyków: Dräger DCD 5000 nie tylko pozwala w łatwy sposób pobrać próbkę śliny, ale także umożliwia przechowywanie próbek i przesyłanie ich do laboratorium w celu analizy, bez obawy o to, że w procesie dojdzie do ich zafałszowania.



D-4347-2014

Dräger SCK

Na potrzeby spełnienia wymagań dotyczących łańcucha dowodowego należy użyć zestawu potwierdzającego ze zbiorniczkiem na ślinę do późniejszego próbkowania podczas analizy w laboratorium jednej próbki wraz z materiałem użytym do wysyłki.

Dane techniczne

Test do wykrywania narkotyków w ślinie

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	32 x 111 x 57 mm
Waga	< 30 g
Zakres roboczy	Praca: od 5°C do 30°C przy 5% do 95% wilgotności względnej
Przechowywanie / transport	od 4°C do 25°C
Czas pomiaru	szybki pomiar: analiza < 5 minut czuły pomiar: analiza < 7 minut
Wybór trybu pomiaru	W zależności od wybranego okresu inkubacji wstępnej i żądanego odcięcia THC zapewniającego szybki lub bardziej czuły odczyt.
Licencje / normy	Licencjonowany jako wyrób medyczny zgodnie z europejską dyrektywą 98/79/WE w zakresie urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro. Poza Unią Europejską tylko do użytku pozamedycznego (bez IVD) lub sądowego (wyłącznie USA).

Informacje zamówieniowe

Dräger DrugCheck® 3000	Opis	Nr.katal.
Test do wykrywania narkotyków w ślinie		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD	Opakowanie: 20 zestawów	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD	Opakowanie: 20 zestawów	83 25 580

Test Dräger DrugCheck® 3000 wykrywa następujące substancje:

- Kokaina (COC)
- Opiaty (OPI)
- Konopie indyjskie (THC)
- Amfetamina (AMP)
- Metaamfetamina (MET)

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

**PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE**
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

